


## Prueba de Embarazo Midstream Corriente Interrumpida (Orina) de un sólo paso

Uso exclusivo para autodiagnostico y in vitro

CE 0197

### Instrucciones

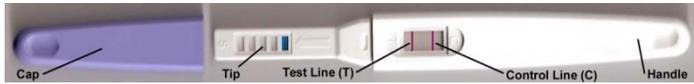

Capuchón Punta Línea de prueba (T) Línea de control (C) Empunadura


Por favor lea las instrucciones antes de realizar la prueba

1. No usar despues de la fecha de caducidad impresa sobre el paquete.
2. Almacenar en un lugar seco entre 4-30°C o 40-86°F. El envoltorio de aluminio debe estar a temperatura ambiente antes de abrir la prueba.
3. No congelar.
4. Mantener fuera del alcance de los niños.
5. Uso exclusivo para autodiagnostico in vitro. No usar internamente.
6. Muy importante: No abrir el envoltorio antes de que la prueba esté a temperatura ambiente.

### Como usar la Prueba


1. Extraer cuidadosamente la prueba de su envoltorio.
2. Quitar el capuchón del test.
3. Mantener el test cogido por la parte de de la empuñadura, con la punta hacia abajo, directamente contra el flujo de orina aproximadamente 10 segundos hasta que el test esté mojado.
4. **IMPORTANTE: No orine en la ventana de Prueba y Control.** Para un mejor resultado, orinar en un recipiente limpio y seco, luego mojar solamente la punta del test en la orina unos 10 segundos.
5. Después de retirar el test de la orina, coloque inmediatamente el capuchón sobre la punta, dejando el test sobre una superficie plana con la ventana de Prueba y Control hacia arriba y comience a medir el tiempo.
6. Durante la realizacion de la prueba, usted verá un ligero flujo rojo en movimiento en la ventana de Prueba y Control. Espere un mínimo de 3 minutos a que aparezca una línea roja. Si dicha línea roja no aparece, siga esperando durante 1 minuto más como mínimo. Algunos resultados positivos pueden aparecer en menos de 1 minuto según la concentracion de hCG.
7. **NO LEER EL RESULTADO DESPUES 10 MINUTOS.**

### Como leer los resultados

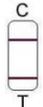


#### EMBARAZADA

La presencia de dos líneas rojas en la ventana de Prueba (T) y Control (C), una línea roja cerca de de la (T) y una línea roja cerca de la (C), significa que probablemente usted esté embarazada. Una línea puede ser más clara que la otra, no tiene por qué ser iguales.

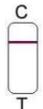

#### NO EMBARAZADA

La presencia de una sola línea roja cerca de la ventana de Control (C) significa que usted probablemente no esté embarazada.

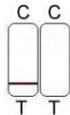

#### RESULTADO NO VALIDO

El resultado no es valido si ninguna línea roja aparece en la ventana de Prueba (T) y Control (C) cerca de la letra (C), o si no hay alguna línea roja cerca de la ventana de Control (C) como se muestra. En este caso repetir la prueba otro test Midstream.

### Precaución

Se recomienda no beber agua inmediatamente antes de la prueba. El agua puede causar la dilucion de las hormonas detectadas en la prueba y comprometer la detección de hCG.



AI DE Diagnostica Co. Ltd., 141 Zhu Zhou Road, Qingdao High-Tech Industrial Park, 266101 Shandong, P.R. China.  
Distribuido en el Reino Unido por Home Health UK Ltd Tel: 01923 711 511, Website: www.homehealthspain.com, Email info@homehealthspain.com

Version 1.0 5/10/14


HOMEHEALTH  
EUROPE

## Prueba de Embarazo Midstream Corriente Interrumpida (Orina) de un sólo paso

Uso exclusivo para autodiagnostico y in vitro

CE 0197

### Instrucciones

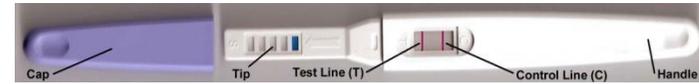

Capuchón Punta Línea de prueba (T) Línea de control (C) Empunadura

Por favor lea las instrucciones antes de realizar la prueba

7. No usar despues de la fecha de caducidad impresa sobre el paquete.
8. Almacenar en un lugar seco entre 4-30°C o 40-86°F. El envoltorio de aluminio debe estar a temperatura ambiente antes de abrir la prueba.
9. No congelar.
10. Mantener fuera del alcance de los niños.
11. Uso exclusivo para autodiagnostico in vitro. No usar internamente.
12. Muy importante: No abrir el envoltorio antes de que la prueba esté a temperatura ambiente.

### Como usar la Prueba

8. Extraer cuidadosamente la prueba de su envoltorio.
9. Quitar el capuchón del test.
10. Mantener el test cogido por la parte de de la empuñadura, con la punta hacia abajo, directamente contra el flujo de orina aproximadamente 10 segundos hasta que el test esté mojado.
11. **IMPORTANTE: No orine en la ventana de Prueba y Control.** Para un mejor resultado, orinar en un recipiente limpio y seco, luego mojar solamente la punta del test en la orina unos 10 segundos.
12. Después de retirar el test de la orina, coloque inmediatamente el capuchón sobre la punta, dejando el test sobre una superficie plana con la ventana de Prueba y Control hacia arriba y comience a medir el tiempo.
13. Durante la realizacion de la prueba, usted verá un ligero flujo rojo en movimiento en la ventana de Prueba y Control. Espere un mínimo de 3 minutos a que aparezca una línea roja. Si dicha línea roja no aparece, siga esperando durante 1 minuto más como mínimo. Algunos resultados positivos pueden aparecer en menos de 1 minuto según la concentracion de hCG.
14. **NO LEER EL RESULTADO DESPUES 10 MINUTOS.**

### Como leer los resultados



#### EMBARAZADA

La presencia de dos líneas rojas en la ventana de Prueba (T) y Control (C), una línea roja cerca de de la (T) y una línea roja cerca de la (C), significa que probablemente usted esté embarazada. Una línea puede ser más clara que la otra, no tiene por qué ser iguales.



#### NO EMBARAZADA

La presencia de una sola línea roja cerca de la ventana de Control (C) significa que usted probablemente no esté embarazada.



#### RESULTADO NO VALIDO

El resultado no es valido si ninguna línea roja aparece en la ventana de Prueba (T) y Control (C) cerca de la letra (C), o si no hay alguna línea roja cerca de la ventana de Control (C) como se muestra. En este caso repetir la prueba otro test Midstream.

### Precaución

Se recomienda no beber agua inmediatamente antes de la prueba. El agua puede causar la dilucion de las hormonas detectadas en la prueba y comprometer la detección de hCG.



AI DE Diagnostica Co. Ltd., 141 Zhu Zhou Road, Qingdao High-Tech Industrial Park, 266101 Shandong, P.R. China.  
Distribuido en el Reino Unido por Home Health UK Ltd Tel: 01923 711 511, Website: www.homehealthspain.com, Email info@homehealthspain.com

Version 1.0 5/10/14

HOMEHEALTH  
EUROPE