

con INDICADOR DE CONCEPCIÓN
Indica cuándo se ha producido la concepción

- ✓ Si realiza la prueba desde la primera falta, podrá hacerla a cualquier hora del día para averiguar si está embarazada.
- ✓ Si la realiza antes de que se produzca la primera falta, utilice la primera orina del día.
- ✓ Para obtener un resultado preciso del indicador de concepción, debe utilizar la primera orina del día.
- ✓ Evite ingerir grandes cantidades de líquido antes de hacer la prueba.

Lea las instrucciones de este folleto atentamente antes de realizar la prueba.

PASO 1 Realice la prueba

Cuando esté preparada para realizar la prueba, extraiga la varilla de prueba del envoltorio de papel de aluminio y retire el capuchón azul. Utilice la varilla de prueba inmediatamente.

PUEDA

Realizar la prueba con el flujo de orina

- Únicamente tiene que colocar el colector absorbente mirando hacia abajo en el flujo de orina **durante solamente 5 segundos**.
- Procure que el resto de la varilla de prueba no se moje.
- Si lo desea, vuelva a colocar el capuchón, y deje la varilla de prueba sobre una superficie plana.

5 SEGUNDOS



O BIEN


Puede recoger una muestra de orina en un recipiente seco y limpio

- Coloque el colector absorbente mirando hacia abajo en el recipiente de orina **durante 20 segundos solamente**.
- Si lo desea, vuelva a colocar el capuchón, y deje la varilla de prueba en una superficie plana.

20 SEGUNDOS



Durante la realización de la prueba, **nunca** mantenga la varilla de prueba con el colector absorbente apuntando hacia arriba.

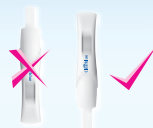

PASO 2 Espere...

- El símbolo de espera parpadeará para indicar que la prueba está funcionando.
- Cuando el símbolo de espera deje de parpadear, aparecerá el resultado. Si el símbolo de espera no aparece después de utilizar la prueba, consulte la pregunta 6 de la sección Preguntas y Respuestas.



PASO 3 Lea el resultado

La prueba de embarazo **Clearblue DIGITAL** presenta un **Indicador de concepción** que ofrece una estimación del tiempo transcurrido desde la concepción. Esta información aparece en el visor junto con el resultado "Embarazada".

- El indicador mostrará el resultado en los **3 minutos** siguientes.
- Es posible que aparezca el resultado "Embarazada" en el visor **antes** que el resultado del indicador de concepción. **Siga esperando** hasta que el símbolo de espera deje de parpadear para ver el resultado del indicador de concepción. Este proceso puede tardar hasta 3 minutos.
- Es posible que los resultados se muestren en tan solo 1 minuto.
- El resultado permanecerá en el visor durante 24 horas aproximadamente.
- Si su resultado es "Embarazada", acuda a su médico para que le informe sobre los pasos a seguir. Su médico calculará en qué fase del embarazo se encuentra basándose en el primer día de su último periodo. La concepción se produce en las dos semanas posteriores a esta fecha en función de la duración del ciclo. El indicador de concepción proporciona un cálculo estimado del tiempo transcurrido desde la concepción.
- El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en la detección del tiempo transcurrido desde la concepción. La estimación se basa en el nivel de hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana) en la orina. El nivel de hCG varía según la mujer, por lo que es posible que el indicador de concepción proporcione resultados erróneos. La precisión del resultado "Embarazada/No Embarazada" es superior al 99% cuando la prueba se realiza a partir de la primera falta.

Interpretación de los resultados

| Resultados | Tiempo transcurrido desde la concepción | Fecha de embarazo según el cálculo médico (basada en un ciclo de 28 días)* |
|-------------------|---|--|
| No Embarazada | Su resultado es "No embarazada" consulte la pregunta 12 de la sección Preguntas y Respuestas. | - |
| Embarazada 1-2 | Su resultado es "Embarazada" y la concepción se produjo hace 1 ó 2 semanas aproximadamente. | 3-4 semanas |
| Embarazada 2-3 | Su resultado es "Embarazada" y la concepción se produjo hace 2 ó 3 semanas aproximadamente. | 4-5 semanas |
| Embarazada 3+ | Su resultado es "Embarazada" y la concepción se produjo hace más de 3 semanas. | Más de 5 semanas |

*Su médico calculará la fecha del embarazo a partir del primer día de su último periodo, no desde el momento de la concepción.

Preguntas y Respuestas:

lea esta sección en la que se responden las preguntas más frecuentes.

Errores de la prueba

lea la sección "Errores de la prueba" si ha utilizado la varilla de prueba y en el visor no aparece ninguno de los resultados indicados en esta página.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. ¿Cómo funciona la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL?

En caso de embarazo, el cuerpo produce la hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana). La cantidad de hormona hCG en el cuerpo aumenta en las fases tempranas del embarazo. Clearblue es capaz de detectar cantidades muy pequeñas de esta hormona en la orina (La sensibilidad de esta prueba es 25mIU/ml). En función del nivel de hCG en la orina, el indicador de concepción de Clearblue ofrecerá un cálculo estimado del tiempo transcurrido desde la concepción.

2. ¿Cuál es el nivel de precisión de la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL en la detección del embarazo?

En pruebas de laboratorio, la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL ha demostrado una precisión superior al 99% en la detección del embarazo cuando se ha utilizado a partir de la primera falta. Si realiza la prueba antes de la primera falta y obtiene un resultado "No Embarazada", sigue existiendo una posibilidad de que esté embarazada. Consulte la pregunta 4.

3. ¿Cuál es el nivel de precisión del indicador de concepción de Clearblue?

El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en la detección del tiempo transcurrido desde la concepción. La estimación se basa en el nivel de hormona del embarazo hCG (gonadotropina coriónica humana) en la orina. El nivel de hCG varía según la mujer, por lo que es posible que el indicador de concepción proporcione alguna vez resultados erróneos. La precisión del resultado "Embarazada/No Embarazada" es superior al 99% cuando la prueba se realiza a partir de la primera falta. Si realiza la prueba transcurridas más de 6 semanas desde el momento de la concepción, es posible que el indicador de concepción muestre resultados distintos de los esperados. Esto se debe a que el nivel de hCG en la orina es demasiado alto para que la prueba pueda proporcionar un cálculo estimado preciso del tiempo transcurrido desde la concepción.

4. ¿Cuándo puedo realizar la prueba de embarazo digital Clearblue?

La prueba de embarazo Clearblue DIGITAL puede utilizarse hasta cuatro días antes de la primera falta. Si realiza la prueba antes de la primera falta y obtiene un resultado "No Embarazada", sigue existiendo una posibilidad de que esté embarazada. Consulte en la tabla siguiente los resultados de pruebas clínicas de la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL con muestras tomadas en fases tempranas del embarazo.

Realización de la prueba en fases tempranas

Clearblue recomienda que la prueba se realice a partir de la primera falta. No obstante, la hormona del embarazo aumenta rápidamente en las primeras fases del embarazo y Clearblue puede utilizarse para realizar la prueba hasta 4 días antes de la primera falta. En las pruebas clínicas con muestras de fases tempranas del embarazo, la prueba de embarazo Clearblue DIGITAL ha proporcionado los siguientes resultados:

| Número de días antes de la primera falta | % de muestras de embarazo embarazadas de las que se ha obtenido un resultado "Embarazada" |
|--|---|
| -1 | 98% |
| -2 | 97% |
| -3 | 86% |
| -4 | 55% |

Si el resultado es "No Embarazada" y sigue sospechando que puede estar embarazada, consulte la pregunta 12. Para determinar cuál es el primer día de la falta, calcule la duración habitual de su ciclo contando los días desde el primer día de la menstruación hasta el día anterior al período siguiente.

• Si sus ciclos son irregulares, deje transcurrir el tiempo equivalente a su ciclo más largo de los últimos meses antes de realizar la prueba.

• Si desconoce la fecha en la que debería venirle el periodo, le recomendamos que no realice la prueba hasta transcurridos al menos 19 días desde su última relación sexual sin protección.

5. ¿Qué fármacos o ciertas enfermedades afectan al resultado?

• Lea siempre las instrucciones del fabricante de cualquier medicamento que esté tomando antes de realizar una prueba.

• Los fármacos de fertilidad que contienen hCG pueden dar lugar a resultados erróneos. Este tipo de fármacos suelen administrarse por inyección y si se realiza la prueba de embarazo al cabo de un tiempo demasiado breve tras la administración, puede obtenerse un resultado positivo falso.

• Otros tratamientos de fertilidad (como la administración de citrato de clomifeno), analgésicos y anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora anticonceptiva) no deberían afectar el resultado.

• Si ha dejado de tomar anticonceptivos hormonales recientemente o si se está sometiendo a tratamientos de fertilidad como, por ejemplo, la administración de citrato de clomifeno, es posible que sus periodos sean irregulares, lo que puede llevarle a realizar la prueba demasiado pronto.

• Si ha estado embarazada recientemente (aunque el embarazo no haya llegado a término), es posible que obtenga un resultado "Embarazada" falso.

• Si ha llegado o está llegando a la menopausia, es posible que obtenga un resultado positivo falso aunque no esté embarazada. En un estudio con mujeres perimenopáusicas y menopáusicas no embarazadas en el que se utilizaron distintos lotes de Clearblue, se obtuvo un promedio del 0.2% de resultados positivos, con un rango de 0% a 0.5% entre los distintos lotes. Todos los resultados falsos se dieron en mujeres de edades superiores a los 50 años.

• Los embarazos ectópicos y los quistes ováricos pueden provocar la obtención de resultados erróneos.

• Los embarazos múltiples y ectópicos pueden dar lugar a resultados erróneos del indicador de concepción.

• Puede producirse un aborto espontáneo en las fases tempranas del embarazo. Si ha obtenido un resultado "Embarazada", es posible que averigüe posteriormente que no está embarazada debido a un aborto espontáneo. Es posible que el indicador de concepción proporcione resultados distintos de los esperados en estas circunstancias.

Si obtiene resultados distintos de los esperados, consulte con su médico.

6. He utilizado la prueba, pero no ha aparecido el símbolo de espera. ¿Qué significa?

La prueba no ha funcionado correctamente. Contacte con la línea de atención al cliente de Clearblue.

7. He utilizado la prueba, pero no aparece ningún resultado en el visor. ¿Qué significa?

El resultado debería mostrarse en el visor en un máximo de 3 minutos. Si no aparece ningún resultado, consulte la sección Errores de la prueba.

8. El resultado de la prueba indica que estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Si su resultado es "Embarazada", acuda a su médico para que le informe sobre los pasos que debe seguir. El indicador de concepción de Clearblue proporciona únicamente un cálculo estimado del tiempo transcurrido de la concepción. Su médico calculará en qué fase del embarazo se encuentra basándose en el primer día de su último periodo. La concepción se produce aproximadamente dos semanas después de esta fecha.

9. El resultado de la prueba indica que estoy

embarazada, pero creo que el resultado del indicador de concepción es erróneo. ¿Es posible?

El indicador de concepción ofrece una precisión del 92% en la realización de pruebas con la primera orina del día. Algunos fármacos o ciertas enfermedades podrían influir en el resultado. Consulte la pregunta 5.

10. Realicé la prueba ayer y el resultado fue "Embarazada". He realizado una nueva prueba hoy y, de acuerdo con el indicador de concepción de Clearblue, el número de semanas transcurridas desde la concepción ha disminuido. ¿Qué debo hacer?

El nivel de hCG fluctúa a medida que aumenta, por lo que es posible que indicador de concepción de Clearblue proporcione resultados distintos a los esperados si realiza la prueba en días consecutivos. Vuelva a realizar la prueba al cabo de 5 días y, si los resultados del indicador de concepción siguen mostrando una reducción en el número de semanas transcurridas desde la concepción, consulte la pregunta 11.

11. Realicé la prueba hace una semana y el resultado fue "Embarazada". He realizado una nueva prueba y, de acuerdo con el indicador de concepción de Clearblue, el número de semanas transcurridas desde la concepción ha disminuido. ¿Qué debo hacer?

Si ha realizado la prueba según las instrucciones, con la primera orina del día en ambas ocasiones, y el indicador de concepción ha mostrado resultados distintos de los esperados, consulte con su médico.

12. El resultado de la prueba indica que no estoy embarazada. ¿Qué debo hacer?

Es posible que no esté embarazada, que el nivel de hormona del embarazo no sea lo suficientemente alto para su detección o que haya calculado mal el día de la primera falta.

• Si ha realizado la prueba demasiado pronto, haga una nueva después de la primera falta.

• Si ya se ha producido la primera falta, realice la prueba de nuevo a los 3 días. Si obtiene el resultado "No Embarazada" con esta prueba y sigue sin tener el periodo, consulte con su médico.

ERRORES DE LA PRUEBA

Error de registro: se ha producido un error durante la realización de la prueba. Es posible que:

• No mantuviera el extremo del colector absorbente apuntando hacia abajo o no colocara la prueba sobre una superficie plana tras aplicar la orina.

• Se aplicara orina en una cantidad excesiva o insuficiente. Vuelva a realizar la prueba con una nueva prueba de embarazo y siga las instrucciones.

Error de visor en blanco: si no aparece ningún dato en el visor después de utilizar la prueba, póngase en contacto con la línea de atención al cliente de Clearblue para obtener más información.

CÓMO DESECHAR LA PRUEBA

• Antes de deshacerse de la prueba, extraiga la pila de la varilla de prueba. Inserte una moneda en la ranura del extremo y gírela para abrir la parte posterior de la varilla de prueba.

• Extraiga la pila y deséchela según el procedimiento de reciclaje adecuado. Precaución: No desmonte ni recargue, ni arroje la pila al fuego. Evite su ingestión. Manténgala fuera del alcance de los niños.

• Deseche el resto de la varilla de prueba según el procedimiento de reciclaje adecuado para equipos eléctricos.

• No arroje equipos eléctricos al fuego.

Este dispositivo cumple con los requisitos para emisiones electromagnéticas del estándar EN61326. Por consiguiente, su nivel de emisión electromagnética es bajo. No se prevé que pueda ocasionar interferencias con otros equipos eléctricos. Esta prueba no debe utilizarse cerca de fuentes de radiación electromagnética potente como, por ejemplo, teléfonos móviles, ya que éstas podrían impedir su correcto funcionamiento. Para evitar la descarga electrostática, no utilice la prueba en entornos muy secos, especialmente aquellos donde se encuentren presentes materiales sintéticos.

Prueba de embarazo para uso doméstico. De un solo uso. Uso exclusivo para autodiagnóstico in vitro. [IVD] Para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar entre 2 °C y 30 °C (36 °F y 86 °F) Deje que el producto alcance la temperatura ambiente durante 30 minutos antes de realizar la prueba si la conservaba en la nevera. No utilizar si el envoltorio de la varilla de prueba está dañado. No utilizar si la varilla de prueba ha superado la fecha de caducidad. Este producto contiene una pila. Desechar según la normativa local. Estas instrucciones corresponden al modelo 506984

Clearblue Asistencia disponible de Lunes a Viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, excepto festivos; puede que no siempre sea posible recibir asistencia en castellano, y su llamada sea atendida en Inglés.

901 010 109

Llamadas facturadas a tarifa local, el coste puede variar dependiendo del operador de telefonía utilizado. Verifique las tarifas exactas de su operador.

Tenga disponible el número de lote [001] que aparece en el envase. Las llamadas son grabadas por motivos de formación y control.

Visite nuestra web en:

www.Clearblue.info

EUROPE

© 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Fabricado por: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginebra, Suiza.

Clearblue es una marca comercial.

Distribuido en España por: Procter & Gamble España S.A. Avda. De Bruselas nº24, 28108. Alcobendas, Madrid