

DRUG STRIP TESTS

Introducción

La idea de la prueba de orina para detectar la presencia de drogas es disuadir a su personal o a su hijo/a de consumir drogas.

Este examen comprueba si se ha consumido drogas. Por favor, consulte su panel de prueba en la tabla que aparece en la página siguiente en la que se encuentran los códigos abreviados, nombres propios y nombres de las drogas (por ejemplo, cocaína o crack) y los tiempos de detección aproximados.

Tenga en cuenta que metanfetaminas son parte de la familia de las anfetaminas y son drogas de lo que normalmente resultarían positivas por consumo de éxtasis (E).

Esta prueba es rápida, precisa y muy fácil de hacer.

Las Drogas en el lugar de trabajo

Las drogas pueden afectar el cerebro y el cuerpo de varias formas y esto puede afectar el desempeño del empleado en el trabajo, incluso si el consumo se hace a cabo fuera del lugar de trabajo.

Como responsable de personal tiene el deber de garantizar en la medida que sea razonablemente posible que sus empleados que abusan de las drogas no son un peligro para el resto de los empleados o el público en general.

Aspectos legales

Si usted es responsable de sus trabajadores y desea comprobar si existe abuso de drogas, es importante que usted tenga alguna forma de realizar esta comprobación, advirtiéndolo a su personal para que sean sometidos a pruebas de consumo de drogas al azar y que el uso de drogas en el lugar de trabajo o estar bajo la influencia de drogas en el lugar de trabajo es un delito que implica la destitución. También es importante que se mantenga al día sobre la última legislación del gobierno. Si uno de sus empleados tiene un problema de drogas debe hacer todo lo posible por ayudarlo y alentarle a buscar ayuda profesional. Si el abuso de drogas es un problema común en el lugar de trabajo puede ser de su interés iniciar un programa de control de abuso de drogas para el personal y los directivos.

Contenido del paquete

- Bolsa en papel de aluminio que contiene prueba de drogas
- Instrucciones

Cuando debo realizar la prueba?

Este test se puede realizar en cualquier momento.

Cuanto se tarda en obtener los resultados?

Los resultados pueden ser leídos en 5 minutos

Precauciones

1. Estos test es para uso externo.
2. No usar los test después de la fecha de caducidad.
3. Usar un panel de pruebas diferente por test de orina para evitar resultados falsos.
4. No usar este test if la bolsa ha sido abierta.

Como son de precisos estos tests?

Esta prueba es muy exacta y los niveles de sensibilidad satisfacen las normas establecidas para SAMHSA (Administración de Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental) de los EE. UU. y los niveles recomendados por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). Sin embargo, existe una posibilidad de resultados falsos debido a la interferencia de otras sustancias en la orina. Sustancias que pueden dar un resultado falso positivo son los siguientes:

- La codeína se puede encontrar en medicamentos, tales como Ibuprofeno y Benlylin
- La morfina, que se puede encontrar en Co-codamol.

Estos le daran un resultado positivo para opiáceos. Sería aconsejable preguntar a la persona que está siendo probado si utiliza cualquier medicamento recetado para uso médico antes de la prueba se lleva a cabo.



Test de droga individual

Debido a la naturaleza sensible de esta prueba, hay que tener cuidado al llevar a cabo la prueba para evitar contaminación y resultados inexactos de las pruebas. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la prueba.


Procedimiento de la Prueba de consumo de Drogas

1. Retire el panel de prueba de la bolsa de aluminio (no romper el sello de la bolsa de aluminio hasta que esté listo para comenzar la prueba).
2. En un vaso de plástico, obtener una muestra de orina de la persona que vaya a ser analizada.
3. Retire la tapa protectora de la parte inferior del panel de ensayo para abrir las tiras de prueba; no toque las tiras y no tire de la tapa protectora.
4. Cuidadosamente sumerja la tira de ensayo en la muestra de orina, asegurándose que la orina no entra en contacto con la caja de plástico de la prueba. Espere durante unos 10-15 segundos que la orina sea absorbida correctamente por la tira.
5. Después de 15 segundos, retire la prueba de la orina y vuelva a colocar la tapa protectora.
6. Coloque el panel en una superficie limpia y plana, mientras que las líneas de prueba se aparecen.
7. Puede obtener los resultados negativos tan pronto como aparecen, pero los resultados positivos se deben leer por lo menos 5 minutos después de la inmersión en la orina. Todos los resultados deben ser leídos dentro de 8 horas, de lo contrario no serían válidos.

Resultados

Leer los resultados de cada tira individualmente e independientemente una de otra.

Vera 2 letras en la cajita de las tiras de prueba, 'C' es la banda de control y 'T', es la banda de la prueba.

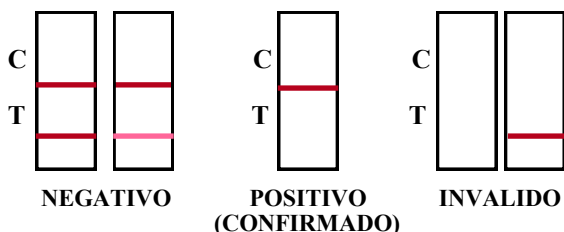

Una línea de color rosa / rojo debe aparecer en cada banda de la banda de control (C), lo que confirma cada tira ha funcionado correctamente.

Si no aparece ninguna línea en la banda de control (C) esta tira no ha funcionado correctamente y es posible que tenga que hacer una nueva prueba.

Si aparece una segunda línea de color rosa / rojo, no importa si es muy debil, aparecera en la línea de prueba (T), se trata de un resultado negativo. Si no hay ninguna línea adicional en la línea de prueba (T), entonces la persona ha dado positivo por abuso de esa droga.

Usando la tabla de abajo encontrara el codigo correspondiente a las etiquetas del test que está probando.

Recuerde que una muestra de orina negativa producirá dos líneas, y una muestra de orina positiva producirá una sola línea en la banda de control (C).

Que hacer con los resultados?

Si obtiene un resultado negativo, entonces la persona no ha consumido drogas en este momento. Es posible que desee volver a probar de nuevo en un mes.

Si obtiene un resultado positivo en una de las bandas de drogas, entonces se ha detectado el consume de drogas en la orina.

Almacenamiento

Esta prueba debe ser almacenada por debajo de 30 ° C (86 ° F), no congelar. Se recomienda tener el kit de la prueba a temperatura ambiente antes de realizar la prueba.

Para mas informacion contactar con:

Diagnostico en casa
Av. Lagartijo, 22 local 3.
Cordoba 14005
Spain

Web: www.diagnosticoencasa.com
Email: ventas@diagnosticoencasa.com

Nombre abreviado en la prueba	Droga	Otros nombres	Tiempo aproximado que la droga permanece en el cuerpo despues de su consumo
AMP	<u>AMFETAMINAS</u>	SPEED, anfetaz, tiza	2-6 dias
BAR	BARBITURICOS	Depresores, BARBS	3-8 dias por consumo casual 3-4 semanas por consumo prolongado
BUP	BUPRENORFINA	Suboxone	3-6 dias
BZO	BENZODIACEPINAS	BENZOS, ROOFIES	2-14 dias
COC	COCAINA	COCE, CRACK o CHARLIE	2-5 dias
MDMA	Metilendioximetanfetamina	Extasis, E, Adán, XTC, X	2-6 dias
MET/mAMP	METAMFETAMINAS	ICE, GLASS or METH	2-6 dias
MOP/MOR	MORPHINA	OPIACEOS	2-5 dias
MTD	METHADONA	DOLFINA, RED ROCK	2-8 dias
OPI	OPIACEOS	HEROINA, CABALLO, SMACK or GEAR	2-5 dias
THC	CANNABIS	MARIHUANA, Chocolate, Hachis, maria, resina de hachis	Uso casual 2-14 dias. Consumo prolongado hasta 30 dias.
K2 /SPICE	K2 / SPICE	JWH—018 / JWH-)73	24 a 72 horas
KET	KETAMINA	SPECIAL K, POLVO K	2-5 dias